

OCUhyl C®

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

OCUhyl C očné roztokové kvapky sú roztok bez konzervačných látok s obsahom hyaluronátu sodného a s prídavkom extraktu nechtíka lekárskoho. Očný roztok je naplnený vo vodiacdávkovvej fľaške so špeciálnym uzáverom Novelia. Fľaška je označená etiketou, zabalená do papierovej škatuľky spolu s návodom na použitie. 1 ml roztoku obsahuje 30 kvapiek.

Zvlhčujúci, hydratačný a upokojujúci účinok na oči

OCUhyl C očné roztokové kvapky poskytujú účinnú úľavu a dlhotrvajúci komfort pri pociťovaní suchosti, pálenia alebo únavy očí. Kyselina hyalurónová je látka prirodzene sa vyskytujúca v oku a iných častiach tela. Extrakt nechtíka lekárskeho má ochranný, protizápalový a regeneračný účinok na očný epitel.

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Hyaluronát sodný 1,2 mg v 1 ml

Pomocné látky: extrakt nechtíka lekárskeho, chlorid sodný, chlorid draselný, trihydrát octanu sodného, citrát sodný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu horečnatého, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom:

extrakt nechtíka lekárskeho (*Calendula officinalis*) 1,0 mg v 1 ml (0,1 %).

Nositelia kontaktných šošoviek:

OCUhyl C očné roztokové kvapky neobsahujú konzervačné látky, takže sú vhodné pre nositeľov kontaktných šošoviek a pre ľudí s citlivými očami.

Účel určenia prípravku

OCUhyl C očné roztokové kvapky sú určené na hydratáciu oka, na vytvorenie dočasného ochranného filmu rohovky oka pri nedostatočnej tvorbe slz, na zlepšenie stability a kvality slzného filmu, čím sa zvlhčuje a chráni povrch oka. Pri stavoch spojených s príznakmi suchého oka.

Indikácie

OCUhyl C očné roztokové kvapky sú určené pre používateľov s miernym, stredne ťažkým a ťažkým syndrómom suchého oka rôznej etiológie:

- keratoconjunctivitis sicca (nedostatok slz, rezanie, svetloplachosť)
- Sjögrenov syndróm
- meibomská blefaritída (zápal očných viečok)
- suché oko v dôsledku starnutia, hormonálnych zmien (menopauza)
- po operácii oka
- cudzie teliesko v oku, únava a pálenie
- príznaky suchého oka spôsobené environmentálnymi a inými faktormi ako je znečistenie ovzdušia, dlhá práca pri počítači, používanie klimatizácie, vietor, chlad, suché teplo, používanie kontaktných šošoviek, užívanie liekov.

Populácia pacientov a určenie používateľa
OCUhyl C očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

Deti mladšie ako 2 roky.


Dávkovanie

Zvyčajne sa aplikuje 1 kvapka 1 až 3 krát denne, môže sa aplikovať aj častejšie. OCUhyl C očné roztokové kvapky je možné používať dlhodobo.

Poučenie pred aplikáciou

OCUhyl C očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka.


1. Umyte si ruky a pohodlne sa posadte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.

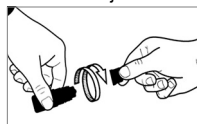

3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stláčaní môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.



6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.
7. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala jedna kvapka. Potom uvoľnite spodné viečko a pomaly oko zatvorte, aby sa OCUhyl C rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu.
Pre ďalšiu kvapku treba nechať späť nasť vzduch do plastovej fľašky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom.
Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.

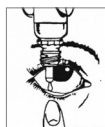

8. V prípade potreby postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľašku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.

10. Bezprostredne po použití nasadíte pevne uzáver späť na fľašku. Fľaška sa uchováva v zvislej polohe.

Kontraindikácie

OCUhyl C očné roztokové kvapky sa nesmú používať pri precitlivенosti na ktorúkoľvek z ich zložiek. Deti mladšie ako 2 roky.



Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace.
- uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



Upozornenie

Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť nevráti opäť do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah jednej fľašky by mala používať iba jedna osoba.

Nežiaduce vedľajšie účinky

OCUhyl C očné roztokové kvapky sú veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa po aplikácii môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako začervenanie, svrbenie a opuch
- lokálne podráždenie (svrbenie, pocit cudzieho telesa alebo mierne pálenie)
- hyperémia (začervenanie) spojoviek
- bolesť oka
- dočasné rozmazané videnie

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi (neziaduceucinky@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos

OCUhyl C očné roztokové kvapky pomáhajú zmierniť príznaky suchosti a očného nepohodlia, zlepšiť zdravie a hojenie povrchu oka.

Pokyny na skladovanie a likvidáciu produktu

Uchovávajte pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s uzáverom Novelia so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1x10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika

