

Potassium U bez konzervačných látok

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú irigačný (výplachový) izotonický roztok, ktorý obsahuje jodid draselný ako prídavnú látku.

Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške so špeciálnym uzáverom Novelia. Fľaška je označená etiketou, zabalená do papierovej škatuľky spolu s návodom na použitie.

1 ml roztoku obsahuje 30 kvapiek.

Výplach očí

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky uľahčujú vymývanie dráždivých častíc vytvorením hydrodynamického prúdenia, ktoré pomáha mechanicky uvoľňovať a odstraňovať dráždivé látky z povrchu oka.

Podpora procesu resorpcie (vstrebávania)
Prípravok obsahuje jodid, ktorý vykazuje antioxidačné vlastnosti, ktoré prispievajú k zníženiu oxidačného stresu a zápalu. Tieto účinky podporujú resorpciu (vstrebávanie) očnej tekutiny a zmeny tkaniva súvisiace s krvácaním v oku, krvácaním do sklovca, zákalom sklovca, rozmazané videnie a suchosť.

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Chlorid sodný 2 mg v 1 ml
Pomocné látky: jodid draselný, tiosíran sodný, edetan disodný, hydroxid sodný, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom:

jodid draselný 20 mg v 1 ml (2 %).

Účel použitia prípravku

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú určené na kvapkanie do oka, na vypláchnutie očí od dráždivých častíc, na zníženie zápalu, diskomfortu alebo rizika infekcie, na prevenciu a podpornú liečbu resorpčných procesov v oku pri očných ochoreniach rôznej etiológie (exsudáty, krvácanie, degeneratívne zmeny v sklovci, katarakta (šedý zákal) a na podpornú liečbu syndrómu suchého oka.

Indikácie

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú určené pre používateľov:

- k výplachom oka na odstránenie dráždivých častíc a environmentálnych faktorov (znečistené ovzdušie, používanie počítača, klimatizácia, nosenie kontaktných šošoviek) alebo pri poranení oka, na zníženie zápalu oka, nepohodlia alebo rizika infekcie
- ako prevencia a podporná liečba resorpčných procesov pri ochoreniach oka rôznej etiológie (exsudáty (výpotok), krvácanie, degeneratívne zmeny sklovca a katarakta) a podporná liečba suchého oka.

Populácia pacientov a určení používateľa

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

- deti mladšie ako 12 rokov
- tehotné alebo dojčiace ženy
- pacienti s poruchou funkcie štítnej žľazy


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 1 až 2 kvapky do spojovkového vaku oka 2 až 4-krát denne, alebo viac kvapiek (maximálne 8 kvapiek za sebou) v prípade potreby výplachu.

Poučenie pred aplikáciou

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka.


1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.

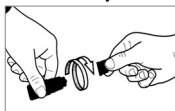

3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stláčaní môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.



6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.
7. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala 1-2 kvapky, alebo viac kvapiek v prípade potreby vypláchnutia. Potom uvoľnite spodné viečko a pomaly oko zatvorte, aby sa Potassium U bez konzervačných látok rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu. Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasať vzduch do plastovej fľašky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom. Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.

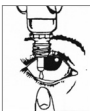

8. V prípade potreby, postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľašku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.
10. Bezprostredne po použití nasadte pevne uzáver späť na fľašku. Fľaška sa uchováva v zvislej polohe.

Kontraindikácie

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sa nesmú používať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek z ich zložiek, pri chronickej pyoderмии pokožky tváre, pri hemoragickej diatéze, v tehotenstve, pri dojčení, u pacientov s poruchou funkcie štítnej žľazy, u novorodencov a u detí mladších ako 12 rokov.



Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace.
- uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



Upozornenie

Nositelia kontaktných šošoviek:

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky neobsahujú konzervačné látky, preto sa odporúča pred použitím tohto prípravku vybrať kontaktné šošovky z očí a po aplikácii počkať 15 minút pred opätovným vložením kontaktných šošoviek.

Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť nevráti opäť do normálneho stavu.

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika



ver.01

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah jednej fľašky by mala používať iba jedna osoba.

Nežiaduce vedľajšie účinky

Pri používaní Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ako začervenanie, svrbenie a opuch očí
- lokálne podráždenie (pálenie, zvýšené slzenie, pocit cudzieho telieska)
- podráždenie spojoviek
- opuch očných viečok
- opuch slzných žliaz
- kožný erytém (začervenanie), akné, dermatitída, purpura

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi (neziaduceucinky@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos

Potassium U bez konzervačných látok očné roztokové kvapky môžu pomôcť predchádzať poškodeniu očí, zápalu a/alebo infekcii. Pomáhajú zmierniť príznaky krvácania, rozmazaného videnia, suchosti a podráždenia očí.

Pokyny na skladovanie a likvidáciu produktu

Uchovávajte pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s uzáverom Novelia so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1x10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu