

SeptoZINC

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

SeptoZINC očné roztokové kvapky sú izotonický výplachový roztok s prísadami antisepticky a synergicky pôsobiacich látok (glukonát zinočnatý a benzalkónium chlorid).

Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške uzatvorenej uzáverom so závitom, označenej etiketou. Fľaška je balená do papierovej škatuľky spolu s návodom na použitie.

1 ml roztoku obsahuje 30 kvapiek.

Výplach očí

SeptoZINC očné roztokové kvapky uľahčujú výplach dráždivých častíc z povrchu oka vytvorením hydrodynamického prúdenia, ktoré pomáha mechanicky uvoľňovať a odstraňovať dráždivé látky z prostredia.

Dezinfekčný účinok

SeptoZINC očné roztokové kvapky obsahujú ióny zinku a benzalkónium chlorid, ktorý vykazuje antimikrobiálne účinky. Antimikrobiálne účinky iónov zinku závisia od mechanizmu tvorby reaktívnych foriem kyslíka, zatiaľ čo antiseptické vlastnosti benzalkónium chloridu sú založené výlučne na jeho povrchovo aktívnych vlastnostiach a antibakteriálnych a antivírusových účinkoch. Tieto dezinfekčné účinky sa využívajú pri podpornej liečbe očných infekcií (antibakteriálnych a antivírusových).

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Chlorid sodný 7,5 mg v 1 ml

Pomocné látky: benzalkónium-chlorid (0,02 %), glukonát zinočnatý (0,1 %), chlorid draselný, chlorid horečnatý hexahydrát, chlorid vápenatý dihydrát, citrát sodný, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom: konzervačná prísada benzalkónium-chlorid 0,2 mg v 1 ml (0,02 %), glukonát zinočnatý 1 mg v 1 ml (0,1 %).

Účel určenia prípravku

SeptoZINC je určený na odstránenie dráždivých častíc a/alebo chemikálií z oka a na kvapkanie do oka pri vystavení vplyvom prostredia (napr. znečistenie, používanie počítača, klimatizácia), na prevenciu očných infekcií a ako podporná liečba akútnych a chronických infekcií spojoviek.

Indikácie

SeptoZINC očné roztokové kvapky sú určené na použitie v prípade poranenia oka, v prípade výskytu mechanických nečistôt na rohovke a/alebo spojovke oka, v prípade infekcie spojovky alebo chronických infekcií spojoviek:

- výplach očí na odstránenie dráždivých častíc a cudzích teliesok pri pôsobení environmentálnych faktorov (lieky, znečistenie, používanie počítača, klimatizácie, kontaktných šošoviek)
- pomáha predchádzať očným infekciám a používa sa ako podporná liečba ochorení spojoviek a chronických infekcií spojoviek.

Populácia pacientov a určenie užívateľa

SeptoZINC očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

Pokiaľ ide o pohlavie, vek a/alebo hmotnosť užívateľov, existuje obmedzenie pre deti mladšie ako 1 rok.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 1 kvapka 3-krát denne, alebo viac kvapiek (maximálne 6 kvapiek za sebou) v prípade výplachu.

Poučenie pred aplikáciou

SeptoZINC očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľašku hore dnom a jej stlačením kvapne do dolného spojkového vaku predpísaný počet kvapiek. Množstvo aplikovaného roztoku závisí od účelu aplikácie.

Kontraindikácie

SeptoZINC očné roztokové kvapky sa nesmú používať v prípade precitlivosti na niektorú zo zložiek prípravku. Deti mladšie ako 1 rok.



Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok alebo konzervačných látok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok, po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 28 dní.
- uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



Upozornenie

Nositelia kontaktných šošoviek

Tento prípravok obsahuje konzervačnú látku benzalkónium-chlorid. Mäkké kontaktné šošovky môžu reagovať s benzalkónium-chloridom a môže sa zmeniť farba kontaktných šošoviek. Pred použitím tohto prípravku si vyberte z očí kontaktné šošovky a po aplikácii počkajte 15 minút, kým si vložíte kontaktné šošovky späť.

Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi následnými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť opäť nevráti do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah fľašky by mala používať len jedna osoba.

Opatnosť je potrebná u pacientov so syndrómom suchého oka a inými ochoreniami očného povrchu, používanie tohto prípravku sa neodporúča dlhšie ako 14 dní.

Nežiaduce vedľajšie účinky

SeptoZINC očné roztokové kvapky sú väčšinou veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejavíť ako mierna vyrážka, exfoliatívna dermatitída alebo multiformný erytém
- hyperémia
- slzenie
- lokálne podráždenie (pálenie, svrbenie, štiepanie, mierne nepohodlie).

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi (neziaduceucinky@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos

SeptoZINC očné roztokové kvapky majú určený klinický prínos.

- Prevencia podráždenia, poškodenia oka, infekcie spôsobené reziduálnymi časticami v oku.
- Doplnková liečba akútnych a chronických infekcií spojoviek.

Pokyny na skladovanie a likvidácia produktu

Uchovávať pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s LDPE kvapkadlom, biely polypropylénový (PP) uzáver so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1x10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriškova 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívajte, ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025

2265