

UNitears® bez konzervačných látok

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú roztok bez konzervačných látok, ktorý obsahuje hypromelózu a dexpantenol. Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške so špeciálnym uzáverom Novelia, označenej etiketou. Fľaška je balená do papierovej škatulky spolu s návodom na použitie. 1 ml roztoku obsahuje 20 kvapiek.

Očné zvlhčenie a hydratácia

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú očný roztok, ktorý vytvára dočasný ochranný film na rohovke a spojovke, čím znižuje odparovanie slz a tak zabráňuje ďalšiemu poškodeniu očného povrchu z nedostatku chýbajúcej slznej tekutiny.

Prípravok svojím zvlhčujúcim a ochranným účinkom pôsobí ako náhrada za nedostatočnú tvorbu slz.

Regenerácia povrchu oka

Dexpantenol ako prídavná látka pomáha urýchľovať regeneráciu povrchových buniek rohovky a spojovky. Prípravok je preto určený aj na epitelizáciu rohovky a spojovky po poranení alebo po operácii oka.

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Hypromelóza 5 mg v 1 ml
Pomocné látky: dexpantenol (1 %), chlorid sodný, edetan disodný, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom:

dexpantenol 10 mg v 1 ml (1 %).

Nositelia kontaktných šošoviek:

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky neobsahujú konzervačné látky, takže sú vhodné pre nositeľov kontaktných šošoviek a pre ľudí s citlivými očami.

Účel určenia prípravku

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú určené na vytvorenie dočasného ochranného filmu na rohovke oka pri nedostatočnej tvorbe slz, čím zvlhčujú a chránia povrch oka pri stavoch spojených s príznakmi suchého oka a u pacientov s malými eróziami rohovky.

Indikácie

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú určené pre užívateľov:

- so suchými očami rôznej etiológie (keratoconjunctivitis sicca, Sjögrenov syndróm, syndróm počítačového videnia, nositelia kontaktných šošoviek s miernou a strednou formou suchého oka, po operácii a/alebo poranení oka)
- s malými eróziami rohovky rôznej etiológie (po vpadnutí malých častíc do oka alebo po operácii oka)
- pri neprijemných pocitoch v očiach (napr. pálení, svrbení, pocite cudzieho teleska) v dôsledku podráždenia spôsobeného vetrom, prachom, cigaretovým dymom, znečisteným vzduchom, kontaktnými šošovkami atď.)

Populácia pacientov a určení užívateľa

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

- deti mladšie ako 1 rok
- tehotné alebo dojčiace ženy.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 1-2 kvapky do spojovkového vaku oka 2 až 6-krát denne.


Poučenie pred aplikáciou

UNitears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka.


1. Umyte si ruky a pohodlne sa posadte alebo postavte.
2. Odskrutkujte uzáver so závitom.

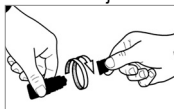

3. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.
4. Pred prvou aplikáciou sa odporúča jemným stlačením fľaštičky skúšobne odkvapnúť prvú kvapku mimo oka, pretože pri silnom a nerovnomernom stláčaní môže roztok vystreknúť vo väčšom objeme.
5. Ukazovák jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

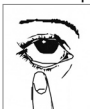

6. Priblížte koniec kvapkadla blízko k vášmu oku tak, aby sa nedotkol oka alebo jeho okolitých oblastí.
7. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do vášho oka dostala 1-2 kvapky prípadne väčšie množstvo roztoku pri výplachu. Potom uvoľníte spodné viečko a pomaly oko zatvorte, aby sa UNitears bez konzervačných látok rovnomerne rozmiestnil po očnom povrchu. Pre ďalšiu kvapku treba nechať späťne nasať vzduch do plastovej fľašky, aby sa vrátila do pôvodného stavu a potom pokračovať v aplikácii do oka odporúčaným spôsobom. Upozorňujeme, že po stlačení môže trvať niekoľko sekúnd, kým dôjde k uvoľneniu kvapky. Nestláčajte príliš silno.

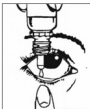

8. V prípade potreby postup opakujte aj pre druhé oko.



9. Po použití otraste fľašku bez dotyku kvapkadla smerom nadol, aby sa odstránila zostávajúca kvapka. Je to potrebné na zabezpečenie sterility nasledujúcich kvapiek.
10. Bezprostredne po použití nasadte pevne uzáver späť na fľašku. Fľaška sa uchováva v zvislej polohe.

Kontraindikácie

UNItears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky, roztok sú kontraindikované:

- u pacientov s alergiou na akúkoľvek látku zdravotníckej pomôcky
- v akútnej fáze poleptania oka až do úplného odstránenia žieravých látok zo spojovkového vaku a odstránenie odumretého tkaniva
- u detí mladších ako 1 rok.



Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace.
- uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.



Upozornenie

Iné súčasne používané očné prípravky

Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov

Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedzte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť opäť nevráti do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah fľašky by mala používať len jedna osoba.

Nežiaduce vedľajšie účinky

UNItears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky sú veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa po aplikácii môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejavovať ako príznak lokálneho podráždenia
- lokálne podráždenie (pálenie, svrbenie, štipanie, mierny nepríjemný pocit)
- hyperémia (začervenanie)
- pocit zlepených očných viečok
- dočasné rozmazané videnie.

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi (neziaduceucinky@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos

UNItears bez konzervačných látok očné roztokové kvapky pomáhajú zmierniť príznaky suchosti, podráždenia, pálenia, očného diskomfortu, zlepšiť ochorenia očného povrchu a podporujú hojenie.

Pokyny na skladovanie a likvidácia produktu

Uchovávajte pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:

Polyetylénová (LDPE) fľaška s uzáverom Novelia so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1x10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika

